

### INSTRUÇÕES SOBRE COLETA – Teste de Woo (Tripanossomose ou Tripanossomíase)

Diagnóstico de *Trypanosoma* spp. pela técnica de Woo.

#### AMOSTRAS

Espécime	Quantidade	Forma de coleta
Sangue fresco com anticoagulante	3 mL	Venopunção

#### CUIDADOS PÓS COLETA

- Amostras de sangue com anticoagulantes não refrigeradas devem ser enviadas ao laboratório até no máximo 6 horas após colheita.

#### ENVIO DAS AMOSTRAS

- Verificar se as amostras estão devidamente identificadas antes do envio;
- Colocar as amostras dentro de um saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Preencher corretamente o Formulário de Requisição de Exames ([clique aqui para obtê-lo](#)) e colocar dentro de outro saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Colocar as amostras e formulário dentro de uma caixa de isopor contendo gelo reciclável;
- Colar na tampa da caixa de isopor o seguinte endereço: [clique aqui para versão de impressão](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA  
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA  
Campus Samambaia. Avenida Esperança, s/n, Campus  
Universitário  
Goiânia-GO CEP: 74.690.900

**ATENÇÃO: AMOSTRAS ENVIADAS SEM O FORMULÁRIO OU COM FORMULÁRIO INCOMPLETO SERÃO DESCARTADAS!**