

**INSTRUÇÕES SOBRE COLETA – Teste de Woo + Esfregaço Sanguíneo + Teste Rápido para  
*Trypanosoma vivax* (Tripanossomose ou Tripanossomíase)**

Diagnóstico de *Trypanosoma* spp. pela técnica de Woo + Esfregaço Sanguíneo e Teste Rápido para  
*Trypanosoma vivax*

**AMOSTRAS**

Espécime	Quantidade	Forma de coleta
Sangue fresco com anticoagulante	3 mL	Venopunção

**CUIDADOS PÓS COLETA**

- As amostras de sangue devem estar acondicionadas em tubos coletores contendo anticoagulantes e serem enviadas ao laboratório até no máximo 6 horas após a colheita. Além disso, as amostras **NÃO** devem ser refrigeradas.

**ENVIO DAS AMOSTRAS**

- Verificar se as amostras estão devidamente identificadas antes do envio;
- Colocar as amostras dentro de um saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Preencher corretamente o Formulário de Requisição de Exames e colocar dentro de outro saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Colocar as amostras e formulário dentro de uma caixa de isopor;
- Colar na tampa da caixa de isopor o seguinte endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA  
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA  
LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS  
Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia.  
CEP: 74.690.900 - Goiânia-GO

**ATENÇÃO: AMOSTRAS ENVIADAS SEM O FORMULÁRIO OU COM FORMULÁRIO INCOMPLETO SERÃO  
DESCARTADAS!**