



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA
LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS



INSTRUÇÕES SOBRE COLETA – DETECÇÃO DE LARVAS

Deteccção de larvas de parasitos em amostras de fezes pela técnica de Baerman.

AMOSTRAS

Espécime	Quantidade	Forma de coleta
Fezes	20g	Exclusivamente da ampola retal

CUIDADOS PÓS COLETA

As amostras de fezes devem ser refrigeradas e enviadas ao laboratório em caixa de isopor contendo gelo reciclável.

ATENÇÃO: Não congelar as amostras de fezes!

ENVIO DAS AMOSTRAS

- Verificar se as amostras estão devidamente identificadas antes do envio;
- Colocar as amostras dentro de um saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Preencher corretamente o Formulário de Requisição de Exames ([clique aqui para obtê-lo](#)) e colocar dentro de outro saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Colocar as amostras e formulário dentro de uma caixa de isopor contendo gelo reciclável;
- Colar na tampa da caixa de isopor o seguinte endereço: [clique aqui para versão de impressão](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA
Campus Samambaia. Avenida Esperança, s/n, Campus
Universitário
Goiânia-GO CEP: 74.690.900

ATENÇÃO: AMOSTRAS ENVIADAS SEM O FORMULÁRIO OU COM FORMULÁRIO INCOMPLETO, SERÃO DESCARTADAS!

Universidade Federal de Goiás - UFG – Campus Samambaia
Avenida Esperança, s/n, Campus Universitário
CEP 74690-900 - Goiânia, Goiás, Brasil

Telefone Fax: 62-3521-1524
email: ladoparufg@gmail.com
website: www.vet.ufg.br