

## INSTRUÇÕES SOBRE COLETA – DETECÇÃO DE LARVAS

Deteção de larvas de parasitos em amostras de fezes pela técnica de Baerman.

### AMOSTRAS

| Espécime | Quantidade | Forma de coleta                |
|----------|------------|--------------------------------|
| Fezes    | 20g        | Exclusivamente da ampola retal |

### CUIDADOS PÓS COLETA

As amostras de fezes devem ser refrigeradas e enviadas ao laboratório em caixa de isopor contendo gelo reciclável.

**ATENÇÃO: Não congelar as amostras de fezes!**

### ENVIO DAS AMOSTRAS

- Verificar se as amostras estão devidamente identificadas antes do envio;
- Colocar as amostras dentro de um saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Preencher corretamente o Formulário de Requisição de Exames e colocar dentro de outro saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Colocar as amostras e formulário dentro de uma caixa de isopor contendo gelo reciclável;
- Colar na tampa da caixa de isopor o seguinte endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA  
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA  
LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS  
Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia.  
CEP: 74.690.900 - Goiânia-GO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA  
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA  
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA  
LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS



**ATENÇÃO: AMOSTRAS ENVIADAS SEM O FORMULÁRIO OU COM FORMULÁRIO INCOMPLETO, SERÃO DESCARTADAS!**

---

Universidade Federal de Goiás - UFG  
Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ  
Setor de Medicina Veterinária Preventiva - SMVP  
Laboratório de Doenças Parasitárias – LADOPAR, Sala 08

Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia  
CEP 74690-900 - Goiânia, Goiás, Brasil

Telefone Fax: 62-3521-1524  
email: [ladoparufg@gmail.com](mailto:ladoparufg@gmail.com)  
website: [www.evz.ufg.br](http://www.evz.ufg.br)