

## INSTRUÇÕES SOBRE COLETA – EXAME PARASTITOLÓGICO DE FEZES

Pesquisa de ovos de parasitos em amostras de fezes pelas técnicas de Flutuação (Willis ou Faust) ou Sedimentação (Hoffmann).

### AMOSTRAS

Espécime	Quantidade	Forma de coleta
Fezes	20g	Preferencialmente da ampola retal ou imediatamente após o animal defecar

### CUIDADOS PÓS COLETA

As amostras de fezes devem ser refrigeradas e enviadas ao laboratório em caixa de isopor contendo gelo reciclável.

**ATENÇÃO: Não congelar as amostras de fezes!**

### ENVIO DAS AMOSTRAS

- Verificar se as amostras estão devidamente identificadas antes do envio;
- Colocar as amostras dentro de um saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Preencher corretamente o Formulário de Requisição de Exames e colocar dentro de outro saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Colocar as amostras e formulário dentro de uma caixa de isopor contendo gelo reciclável;
- Colar na tampa da caixa de isopor o seguinte endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA  
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA  
LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS  
Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia.  
CEP: 74.690.900 - Goiânia-GO

**ATENÇÃO: AMOSTRAS ENVIADAS SEM O FORMULÁRIO OU COM FORMULÁRIO INCOMPLETO SERÃO DESCARTADAS!**