



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA
LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS



INSTRUÇÕES SOBRE COLETA – OPG

Contagem de ovos por grama de fezes (OPG) pelo método de Gordon & Whitlock modificado. Diagnóstico indicado para ruminantes.

AMOSTRAS

Espécime	Quantidade	Forma de coleta
Fezes	20g	Exclusivamente da ampola retal

CUIDADOS PÓS COLETA

As amostras de fezes devem ser refrigeradas e enviadas ao laboratório em caixa de isopor contendo gelo reciclável.

ATENÇÃO: Não congelar as amostras de fezes.

ENVIO DAS AMOSTRAS

- Verificar se as amostras estão devidamente identificadas antes do envio;
- Colocar as amostras dentro de um saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Preencher corretamente o Formulário de Requisição de Exames ([clique aqui para obtê-lo](#)) e colocar dentro de outro saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Colocar as amostras e formulário dentro de uma caixa de isopor contendo gelo reciclável;
- Colar na tampa da caixa de isopor o seguinte endereço: [clique aqui para versão de impressão](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA
Campus Samambaia. Avenida Esperança, s/n, Campus
Universitário
Goiânia-GO CEP: 74.690.900

ATENÇÃO: AMOSTRAS ENVIADAS SEM O FORMULÁRIO OU COM FORMULÁRIO INCOMPLETO, SERÃO DESCARTADAS!