



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA
LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS



INSTRUÇÕES SOBRE COLETA – LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA

Diagnóstico de Leishmaniose Visceral Canina por meio de diagnóstico direto (esfregaço corado pela técnica de Panótico Rápido).

AMOSTRAS

Espécime	Quantidade	Forma de coleta
Medula Óssea	2 lâminas	Punção da medula óssea
Linfonodo Poplíteo	2 lâminas	Aspiração de conteúdo do linfonodo poplíteo

CUIDADOS PÓS COLETA

- Colocar material coletado em uma lâmina e realizar esfregaço.
- As lâminas podem ser mantidas e enviadas em temperatura ambiente.

ENVIO DAS AMOSTRAS

- Verificar se as amostras estão devidamente identificadas antes do envio;
- Colocar as amostras dentro de um saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Preencher corretamente o Formulário de Requisição de Exames ([clique aqui para obtê-lo](#)) e colocar dentro de outro saco plástico ou frasco coletor, ambos bem fechados;
- Colocar as amostras e formulário dentro de uma caixa de isopor contendo gelo reciclável;
- Colar na tampa da caixa de isopor o seguinte endereço: [clique aqui para versão de impressão](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA
Campus Samambaia. Avenida Esperança, s/n, Campus
Universitário
Goiânia-GO CEP: 74.690.900

ATENÇÃO: AMOSTRAS ENVIADAS SEM O FORMULÁRIO OU COM FORMULÁRIO INCOMPLETO SERÃO DESCARTADAS!

Universidade Federal de Goiás - UFG – Campus Samambaia
Avenida Esperança, s/n, Campus Universitário
CEP 74690-900 - Goiânia, Goiás, Brasil

Telefone Fax: 62-3521-1524
email: ladoparufg@gmail.com
website: www.vet.ufg.br